

Euronda

Piano di manutenzione

Euronda[®]

Pro System

Piano di manutenzione

I prezzi indicati sono relativi al mercato italiano, al netto di IVA ed eventuali costi di trasporto.

Per mantenere la validità della garanzia e assicurare la funzionalità dei dispositivi Euronda è necessario rispettare il piano di manutenzione.


L’obbligo di corretta manutenzione è definito nel D. Lgs 81/08 in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro e nella Raccomandazione n.9 del ministero della Salute in tema di rischio clinico nonché nella giurisprudenza intervenuta in materia di responsabilità dell’utente per cattiva manutenzione (si veda la Cassazione Penale 15 aprile 2008 n. 15553).

Attenzione

Il piano di manutenzione varia a seconda del modello e dell’anno di fabbricazione pertanto è sempre opportuno fare riferimento alla matricola. Si ricorda che la matricola delle autoclavi Euronda ha la seguente struttura:

EX	A	22	0001
Euronda	Lettera ad indicare il modello	2 cifre ad indicare l’anno	Numero progressivo

Si ricorda che la manutenzione va registrata nel libretto di servizio, incollando gli appositi adesivi presenti nei kit manutenzione (fac-simile riportato di seguito).

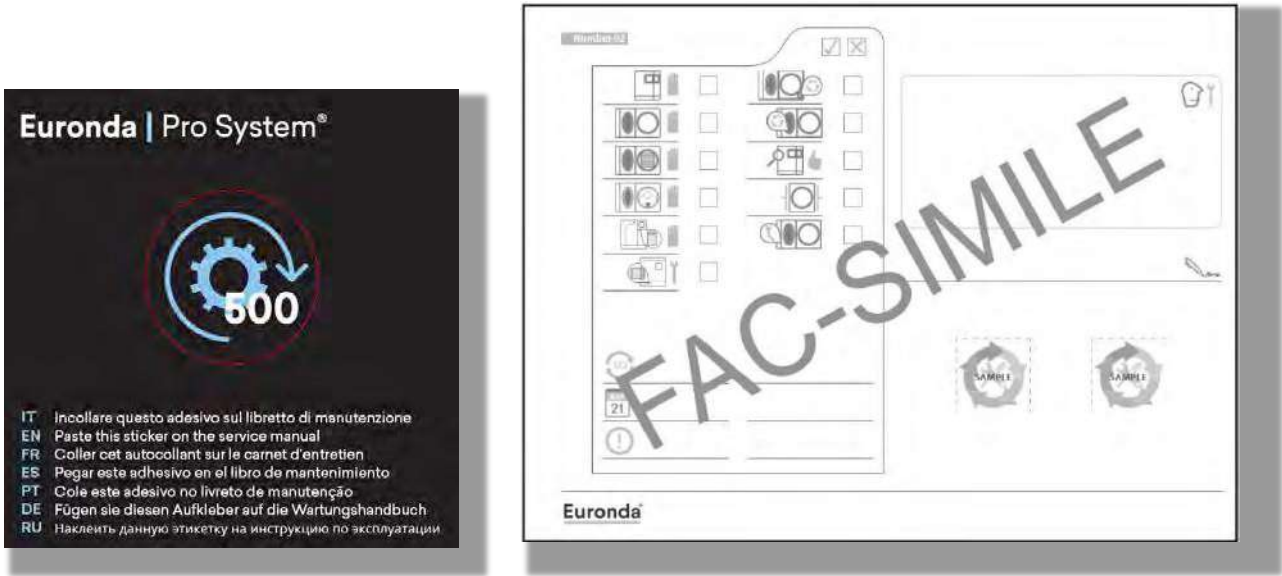

I tempi di esecuzione riportati sono indicativi e fanno riferimento all’apparecchio installato in una posizione che permetta di operare agevolmente.

Euronda S.p.A. si riserva di cambiare codici e prezzi senza preavviso.



Autoclave E10 2024

Manutenzione ordinaria in capo all'utilizzatore:

Per questo tipo di attività non è necessario applicare gli adesivi sul libretto di manutenzione, ma, dopo avere eseguito l'operazione come da [video tutorial](#) è necessario resettare il contatore di riferimento a display.

Manutenzione Ordinaria:

Messaggio	Codice	Descrizione	Tempo esecuzione	Prezzo ricambi
-	FASE 1	Ogni 500 cicli		
	815217	Filtro batteriologico	h 1,5*	29,00 €
-	FASE 2	Ogni 1000 cicli		
	815370	Guarnizione porta Filtro batteriologico	h 1,5*	72,00 €

* Il tempo indicato comprende i cicli di verifica (Vacuum test e ciclo B 134 rapido).

Manutenzione Programmata con tecnico autorizzato Euronda:

Per questo tipo di attività la manutenzione va registrata nel libretto di servizio, incollando gli appositi adesivi presenti nei kit manutenzione.

Messaggio	Codice	Descrizione	Tempo esecuzione	Prezzo ricambi
M1	FASE 1	2000 cicli o 2 anni		
	815399	Filtro batteriologico Guarnizione porta Filtri aria (laterale e frontale) Filtro fono assorbente per serbatoio Pompa scarico Valvola di sicurezza Tubo silicone per pinza tubo	h 2,5*	240,00 €
M2	FASE 2	4000 cicli o 2 anni		
	815400	Filtro batteriologico Guarnizione porta Filtri aria (laterale e frontale) Filtro fono assorbente per serbatoio Valvola di sicurezza Tubo silicone per pinza tubo Kit valvola S11 Pompa vibrazione Blocchetto vapore Elettrovalvole EV5 ed EV7 Filtro camera	h 3,5*	520,00 €



Autoclave

E10 / E9 / E8 XD / E8

Valido per le autoclavi prodotte a partire da gennaio 2022

Per la definizione del piano di manutenzione corretto fa fede l'anno riportato sulla matricola dell'autoclave.

Manutenzione Ordinaria:

Messaggio	Codice	Descrizione	Tempo esecuzione	Prezzo ricambi
M1		Ogni 500 cicli		
	815217	Filtro batteriologico	h 1,5*	29,00 €
M2		Ogni 1000 cicli		
	815370	Guarnizione porta Filtro batteriologico	h 1,5*	72,00 €

* Il tempo indicato comprende i cicli di verifica (Vacuum test e ciclo B 134 rapido).

** Nello starter kit di E10 ed E9 Next è incluso un filtro batteriologico.

Manutenzione Programmata con tecnico autorizzato Euronda:

Per questo tipo di attività la manutenzione va registrata nel libretto di servizio, incollando gli appositi adesivi presenti nei kit manutenzione.

Messaggio	Codice	Descrizione	Tempo esecuzione	Prezzo ricambi
M3		2000 cicli o 2 anni		
	815371	Filtro batteriologico Guarnizione porta Pompa svuotamento separatore Valvola di sicurezza Valvola iniezione acqua	h 2,5*	240,00 €
M3	FASE 2	4000 cicli o 2 anni		
	815372	Filtro batteriologico Guarnizione porta Valvola di sicurezza Valvola iniezione acqua Pompa svuotamento separatore Pompa iniezione acqua Blocchetto elettrovalvole vapore	h 3,5*	520,00 €

* Il tempo indicato comprende i cicli di verifica (Vacuum test e ciclo B 134 rapido).



Autoclave

E10 / E9 / E8 XD / E8

Valido per le autoclavi prodotte fino a dicembre 2021

Messaggio	Codice	Descrizione	Tempo esecuzione	Prezzo ricambi
M1	FASE 1	500 cicli o 1 anno		
	815217	Filtro batteriologico	h 1,5*	29,00 €**
M1, M2, M3	FASE 2	1000 cicli o 2 anni		
	815113	Filtro batteriologico Guarnizione porta Valvole iniezione acqua Valvola di non ritorno a sfera Tubo scarico separatore aria-acqua	h 2,0*	169,00 €
M1	FASE 3	1500 cicli		
	815217	Filtro batteriologico	h 1,5	29,00 €

Messaggio	Codice	Descrizione	Tempo esecuzione	Prezzo ricambi
M1, M2, M3	FASE 4	2000 cicli o 4 anni		
	815113	Filtro batteriologico	h 2,5*	249,00 €
	815110	Guarnizione porta Valvole iniezione acqua Valvola di non ritorno a sfera Tubo scarico separatore aria-acqua Pompa iniezione acqua Valvola di sicurezza		
M1	FASE 5	2500 cicli		
	815217	Filtro batteriologico	h 0,5	29,00 €
M1, M2, M3	FASE 6	3000 cicli o 6 anni		
	815113	Filtro batteriologico	h 3,0	320,00 €
	815211	Guarnizione porta Valvole iniezione acqua Valvola di non ritorno a sfera Tubo scarico separatore aria-acqua Elettrovalvola vuoto Filtro camera		
M1	FASE 7	3500 cicli		
	815217	Filtro batteriologico	h 1,5*	29,00 €
M1, M2, M3	FASE 8	4000 cicli o 8 anni		
	815113	Filtro batteriologico	h 3,5	618,00 €
	815212	Guarnizione porta Valvole iniezione acqua Valvola di non ritorno a sfera Tubo scarico separatore aria-acqua Pompa iniezione acqua Valvola di sicurezza Blocchetto elettrovalvole vapore Pompa di svuotamento separatore		

* Il tempo indicato comprende anche l'esecuzione dei cicli di verifica (Vacuum test e ciclo B 134 rapido).

** Nello starter kit di E10 ed E9 Next è incluso un filtro batter



Autoclave
EXL

Messaggi o	Codice	Descrizione	Tempo esecuzione	Prezzi ricambi
M1	FASE 1	Ogni 500 cicli		
	815217	Filtro batteriologico	h 1,5*	incluso nello starter kit
M3	FASE 2	1500 cicli o 2 anni		
	815296	Filtro batteriologico Guarnizione porta Valvole iniezione acqua Valvola di non ritorno a sfera Tubo scarico separatore aria- acqua	h 2.0	154,00 €
M3	FASE 3	3000 cicli o 4 anni		
	815296	Filtro batteriologico Guarnizione porta Valvole iniezione acqua Valvola di non ritorno a sfera Tubo scarico separatore aria- acqua	h 3.0	420,00 €
	815297	Pompa iniezione acqua Valvola di sicurezza Elettrovalvola vuoto		

*Solo su E10, E9, E8 e EXL può essere cambiato direttamente dal cliente stesso senza il supporto del tecnico; il tempo indicato comprende i cicli di verifica (Vacuum test e ciclo B 134 rapido).



Autoclave
E9 Med S2
(senza generatore di vapore)

Codice	Descrizione	Tempo esecuzione	Prezzo ricambi
FASE 1	500 cicli o 1 anno		
815168	Filtro batteriologico Guarnizione porta	h 1,5*	72,00 €
FASE 2	1000 cicli o 2 anni		
815113	Filtro batteriologico Guarnizione porta Valvole iniezione acqua Valvola scarico separatore aria-acqua	h 2,0	169,00 €
FASE 3	1500 cicli		
815168	Filtro batteriologico Guarnizione porta	h 1,5*	72,00 €

Codice	Descrizione	Tempo esecuzione	Prezzo ricambi
FASE 4	2000 cicli o 4 anni		
815113 815110	Filtro batteriologico Guarnizione porta Valvole iniezione acqua Valvola scarico separatore aria-acqua Pompa iniezione acqua Valvola di sicurezza	h 2,5	249,00 €
FASE 5	2500 cicli		
815168	Filtro batteriologico Guarnizione porta	h 1,5*	72,00 €
FASE 6	3000 cicli o 6 anni		
815113 815114	Filtro batteriologico Guarnizione porta Valvole iniezione acqua Valvola scarico separatore aria-acqua Elettrovalvola tenuta camera	h 3,0	309,00 €
FASE 7	3500 cicli		
815168	Filtro batteriologico Guarnizione porta	h 1,5*	72,00 €
FASE 8	4000 cicli o 8 anni		
815113 815116	Filtro batteriologico Guarnizione porta Valvole iniezione acqua Valvola scarico separatore aria-acqua Elettrovalvola ingresso aria Elettrovalvola aspirazione pompa del vuoto Elettrovalvola mandata pompa del vuoto Pompa iniezione acqua Valvola di sicurezza	h 3,5	645,00 €

* Il tempo indicato comprende anche l'esecuzione dei cicli di verifica (Vacuum test e ciclo B 134 rapido).



Autoclave
E9 Med S1
(con generatore di vapore)

Codice	Descrizione	Tempo esecuzione	Prezzo ricambi
FASE 1	500 cicli o 1 anno		
815168	Filtro batteriologico Guarnizione porta	h 1,5*	72,00 €
FASE 2	1000 cicli o 2 anni		
815113	Filtro batteriologico Guarnizione porta Valvole iniezione acqua Valvola scarico separatore aria-acqua	h 2,0	169,00 €
FASE 3	1500 cicli		
815168	Filtro batteriologico Guarnizione porta	h 1,5*	72,00 €

Codice	Descrizione	Tempo esecuzione	Prezzo ricambi
FASE 4	2000 cicli o 4 anni		
815113	Filtro batteriologico	h 2,5	249,00 €
	Guarnizione porta		
	Valvole iniezione acqua		
815110	Valvola scarico separatore aria-acqua		
	Pompa iniezione acqua		
	Valvola di sicurezza		
FASE 5	2500 cicli		
815168	Filtro batteriologico	h 1,5	72,00 €
	Guarnizione porta		
FASE 6	3000 cicli o 6 anni		
815113	Filtro batteriologico	h 3,0	339,00 €
815207	Guarnizione porta		
	Valvole iniezione acqua		
	Valvola scarico separatore aria-acqua		
	Elettrovalvola tenuta camera		
FASE 7	3500 cicli		
815168	Filtro batteriologico	h 1,5	72,00 €
	Guarnizione porta		
FASE 8	4000 cicli o 8 anni		
815113	Filtro batteriologico	h 3,5	530,00 €
815208	Guarnizione porta		
	Valvole iniezione acqua		
	Valvola scarico separatore aria-acqua		
	Elettrovalvola aspirazione pompa del vuoto		
	Elettrovalvola mandata pompa del vuoto		
	Pompa iniezione acqua		
	Valvola di sicurezza		

* Il tempo indicato comprende anche l'esecuzione dei cicli di verifica (Vacuum test e ciclo B 134 rapido).



Autoclave

E9 Recorder

Codice	Descrizione	Tempo esecuzione	Prezzo ricambi
FASE 1	500 cicli o un 1 anno		
815168	Filtro batteriologico Guarnizione porta	h 1,5*	72,00 €
FASE 2	1000 cicli o 2 anni		
815157	Filtro batteriologico Guarnizione porta Filtro scarico camera Tubo scarico separatore aria-acqua Condensatore pompa vuoto Elettrovalvola EV7	h 1,5	159,00 €
FASE 3	1500 cicli		
815168	Filtro batteriologico Guarnizione porta	h 1,5*	72,00 €

Codice	Descrizione	Tempo esecuzione	Prezzo ricambi
FASE 4	2000 cicli o 4 anni		
815157	Filtro batteriologico Guarnizione porta Filtro scarico camera Tubo scarico separatore aria-acqua Condensatore pompa vuoto	h 2,5	239,00 €
815110	Elettrovalvola EV7 Pompa iniezione acqua Valvola di sicurezza		
FASE 5	2500 cicli		
815168	Filtro batteriologico Guarnizione porta	h 1,5	72,00 €
FASE 6	3000 cicli o 6 anni		
815157	Filtro batteriologico Guarnizione porta Filtro scarico camera Condensatore pompa vuoto	h 3,0	385,00 €
815159	Elettrovalvola EV7 Blocchetto elettrovalvole aria		
FASE 7	3500 cicli		
815168	Filtro batteriologico Guarnizione porta	h 1,5	72,00 €
FASE 8	4000 cicli o 8 anni		
815157	Filtro batteriologico Guarnizione porta Filtro scarico camera Condensatore pompa vuoto	h 3,5	628,00 €
815160	Elettrovalvola EV7 Blocchetto valvole vapore Pompa iniezione acqua Elettrovalvola EV7 Valvola di sicurezza Tubo scarico separatore aria-acqua		

* Il tempo indicato comprende anche l'esecuzione dei cicli di verifica (Vacuum test e ciclo B 134 rapido).



Termodisinfectore

Eurosafe 60 – 1 pompa

(solo detergente)

Codice	Descrizione	Tempo esecuzione	Prezzo ricambi
FASE 1	1 anno		
815225	Filtro aria Tubo detergente Tubo pompa detergente Valvola unidirezionale Oring	h 2,0	180,00 €
FASE 2	1000 cicli		
832652	Guarnizione porta	h 1,5	45,00 €



Termodisinfettore

Eurosafe 60 – 2 pompe

(detergente e brillantante)

Codice	Descrizione	Tempo esecuzione	Prezzo ricambi
FASE 1	1 anno		
815226	Filtro aria Tubo detergente Tubo pompa detergente Tubo brillantante Tubo pompa brillantante Valvole unidirezionali Oring	h 2,0	309,00 €
FASE 2	1000 cicli		
832652	Guarnizione porta	h 1,5	45,00 €



Termodisinfettore

Eurosafe 170

(detergente e brillantante)

Codice	Descrizione	Tempo esecuzione	Prezzo ricambi
FASE 1	1 anno		
832818	Tubo silicone valvola peristaltica detergente Tubo silicone valvola peristaltica brillantante	h 0,5	70,76

Pezzi di ricambio di comune utilizzo

Codice	Descrizione	Prezzo ricambi
816042	Kit cartucce resine AQUAFILTER	81,00 €
832160	Rotolo carta termica PRINTSET 1 (12pz)	54,18 €
815261	Rotolo etichette adesive PRINTSET 2 (10 pz.)	126,00 €
832622	Rotolo etichette adesive PRINTSET 3 (1pz)	65,00 €
832161	Rotolo carta termica E7/E9 MED INSP (10pz)	60,00 €
815120	Filtro batteriologico per autoclavi (5pz)	105,00 €
815121	Guarnizione porta per autoclavi (5pz)	220,00 €
832404	Valvola unidirezionale tarata per autoclavi	30,00 €
815129	Kit valvola S11 per autoclavi	22,00 €
815181	Pompa iniezione acqua per autoclavi	59,00 €
814021	Pulitore per AQUADIST	19,50 €
814003	Carbone attivo per AQUADIST	20,00 €
831588	Lama per sigillatrici EURONDA	12,70 €
831554	Profilo in silicone sigillatrici EURONDA	13,70 €



Per qualsiasi informazione visita il nostro sito MyEuronda, il portale dedicato al Service sviluppato per fornire un supporto completo sui prodotti Euronda, la loro manutenzione e gli aggiornamenti disponibili.

Accedendo all'area riservata sarà possibile visionare e scaricare tutti i firmware, i service manual, il manuale utente, i software di comunicazione. Scopri di più su myeuronda.com



Euronda S.p.A.

Via Chizzalunga 1, 36066

Sandrigio (VI) - Italy

t (+39) 0444 656111

f (+39) 0444 656199

m info@euronda.com

www.euronda.com